

Produkt- Datenblatt

Jaamp
CHEMIE

DESI WIPES

Desinfektionstücher



Produktbeschreibung

DESI WIPES sind gebrauchsfertige, mit einer **alkoholhaltigen Schnelldesinfektion** getränkte Vliestücher. Sie ermöglichen die schnelle und komfortable Desinfektion von Flächen und Gegenständen – ohne zusätzliches Sprühen oder Nachwischen. Die Tücher besitzen ein breites Wirkspektrum **gegen Bakterien**, Pilze und Viren (u. a. MRSA, TB, Noroviren, Adenoviren, Coronaviren) und werden gemäß RKI als „**begrenzt viruzid PLUS**“ eingestuft. Die Flächen trocknen schnell und rückstandsfrei ab und zeigen eine gute Materialverträglichkeit auf vielen alkoholbeständigen Oberflächen.

Vorteile auf einen Blick

- Praktische **Desinfektionstücher** – gebrauchsfertig im Spender-Eimer
- Alkoholische Schnelldesinfektion mit breitem Wirkspektrum
- Wirksam gegen Bakterien, Pilze und viele Viren (begrenzt viruzid PLUS)
- **Schnelle, rückstandsfreie Abtrocknung**
- Gute Materialverträglichkeit auf vielen alkoholbeständigen Oberflächen
- Ideal für die **Zwischendesinfektion** im Alltag – ohne Sprühnebel

Anwendung & Dosierung

1. Eimer öffnen, einzelnes Tuch aus der Öffnung entnehmen.
2. Zu desinfizierende Flächen und Gegenstände **vollständig benetzen** – auf vollständige Benetzung achten.
3. **Mindestens 30 Sekunden** einwirken lassen (ggf. längere Einwirkzeit nach Desinfektionsplan).
4. Fläche anschließend an der Luft trocknen lassen – **nicht nachwischen**.
5. Eimer nach der Entnahme sofort wieder gut verschließen, damit die Tücher nicht austrocknen.

Einsatzbereiche

- Flächen- und Objektdesinfektion im Gesundheitswesen (z. B. Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Therapieräume)
- Desinfektion von **Arbeitsflächen**, **Handgriffen**, **Geräten** und Kleinmaterial
- Hygienebereiche in **Büros**, **Schulen**, **Kitas** und öffentlichen Einrichtungen
- **Kassenbereiche**, **Theken**, **Tresen**, **Türgriffe** und Handkontaktflächen
- Fahrzeuge im Rettungsdienst und im gewerblichen Bereich
- Überall dort, wo Flächen schnell und unkompliziert desinfiziert werden sollen
- (Jeweilige gesetzlichen Vorgaben und Herstellerangaben der Oberflächen beachten.)

Gebindegröße

DESI WIPES ist erhältlich als:

- **Eimer mit 100 getränkten Vliestüchern**

Produkt- Datenblatt

Jaamp
CHEMIE

DESI WIPES

Desinfektionstücher

Sicherheitshinweise

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Brand: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Materialverträglichkeit

Für alkoholverträgliche, abwischbare Oberflächen geeignet. Vor allem geeignet für glatte, nicht poröse Flächen. Bei empfindlichen Materialien wie lackierten, beschichteten oder kunststoffempfindlichen Oberflächen vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Lagerung &

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. Sicherstellen, dass Leckagen aufgefangen werden können (z.B. Auffangwannen oder Auffangflächen). Nicht zusammen lagern mit: Gas. Explosivstoffe. Entzündbare feste Stoffe. Selbstentzündliche (pyrophore) flüssige und feste Stoffe. Selbsterhitzungsfähige Stoffe oder Gemische. Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln. Entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe. Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. Ammoniumnitrat. Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische. Organische Peroxide. Nicht brennbare giftige Stoffe. Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgefährliche Stoffe. Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Schützen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit Frost. Lagertemperatur: 15-25°C

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen der Produktbeschreibung und stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Maßgeblich ist die jeweils aktuelle Produktspezifikation.

Stand 04/2026

