

Produkt- Datenblatt

Jaamp
— C H E M I E —

MediFlex

Professioneller Schutzverband



Produktbeschreibung

MediFlex ist ein professioneller, selbsthaftender Schutzverband zum schnellen Schutz von Händen, Fingern und anderen Gliedmaßen. Die elastische Bandage klebt nur auf sich selbst, nicht auf Haut oder Haaren, und lässt sich dadurch angenehm tragen und leicht wieder entfernen.

MediFlex schützt zuverlässig vor Schmutz und Spritzwasser und fixiert kleinere Verbände oder Pflaster sicher. Durch seine Flexibilität passt sich der Verband den Bewegungen gut an und bleibt dabei atmungsaktiv – ideal für den Einsatz im Arbeitsalltag.

Vorteile auf einen Blick

- Selbsthaftender Schutzverband
- Klebt nur auf sich selbst, nicht auf Haut oder Haaren
- Schützt vor Schmutz und Spritzwasser
- Flexibel, elastisch und angenehm zu tragen
- Atmungsaktiv und leicht anzulegen
- Ohne Schere abreißbar
- Ideal für Hände, Finger und stark beanspruchte Bereiche

Einsatzbereiche

- Schutz von Händen und Fingern bei handwerklichen und industriellen Tätigkeiten
- Fixierung von Pflastern, Kompressen und kleinen Verbänden
- Schutz vor Verschmutzung bei leichten Verletzungen oder Hautirritationen
- Einsatz in Werkstatt, Produktion und Logistik
- Für Erste-Hilfe-Sets, Servicefahrzeuge und Werkzeugkoffer

Hinweis: MediFlex ersetzt keine medizinische Wundversorgung. Bei größeren oder ernsten Verletzungen ärztliche Behandlung aufsuchen.

Anwendung & Dosierung

1. Benötigte Länge der Bandage von der Rolle abreißen.
2. Mit leichtem Zug um die zu schützende Stelle wickeln.
3. Die Bandage haftet auf sich selbst, ein zusätzliches Fixieren ist nicht notwendig.
4. Bei Bedarf Verband erneuern.

Anwendung an Fingerspitzen:

Bandage einmal um den Finger wickeln, dabei etwas über die Fingerkuppe hinausstehen lassen. Das überstehende Stück umklappen und anschließend mit mindestens zwei Lagen sicher umwickeln.

Gebindegröße

MediFlex ist erhältlich als:

- **1 Dose mit Verband 50 mm x 4,5 m**

Produkt- Datenblatt

Jaamp
— C H E M I E —

MediFlex

Professioneller Schutzverband

Sicherheitshinweise

Produkt nur bestimmungsgemäß zur äußeren Anwendung verwenden. Nicht auf schwere, stark blutende oder infizierte Wunden ohne entsprechende medizinische Versorgung anwenden.

Bei anhaltenden Beschwerden, Hautreizungen oder ernsteren Verletzungen ärztlichen Rat einholen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Hinweise auf der Verpackung beachten.

Materialverträglichkeit

MediFlex ist für die äußerliche Anwendung auf geschützter oder leicht verletzter Haut sowie zur Fixierung kleiner Wundauflagen vorgesehen. Da der Verband nur auf sich selbst haftet, ist das Tragen in der Regel angenehm und hautschonend.

Das Produkt klebt nicht auf Haut oder Haaren und lässt sich dadurch besonders einfach wieder entfernen. Bei empfindlicher Haut oder individuellen Reaktionen sollte die Anwendung zunächst an einer kleinen Stelle geprüft werden.

Lagerung & Haltbarkeit

MediFlex trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Die Spenderdose nach Gebrauch geschlossen halten, um das Material vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.

Nur in der Originalverpackung aufbewahren. Bei sachgerechter Lagerung bleibt das Produkt langfristig einsatzfähig.



Entsorgung

Gebrauchte Bandagen und verunreinigtes Material gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Bei normalem Gebrauch kann die Entsorgung in der Regel über den Restmüll erfolgen.

Bei Kontakt mit verunreinigten oder biologisch belasteten Stoffen sind die jeweils geltenden betrieblichen und hygienischen Entsorgungsvorgaben zu beachten.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dienen der Produktbeschreibung. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Maßgeblich sind die Hinweise auf der Verpackung sowie die sachgemäße Anwendung des Produkts.

Stand 05/2026